

## TÉCNICA DE APLICAÇÃO DAS BARREIRAS BONE HEAL® E HEAL BONE®

### Passo 1: Preparação Inicial

O processo começa com uma avaliação detalhada e preparação do local para o procedimento.

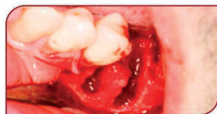


Fig. 1

Como qualquer outro material implantável, o seu uso deverá atender os requisitos da cirurgia asséptica.

### Passo 2: Aplicação da Barreira

A barreira Bone Heal® ou Heal Bone® é cuidadosamente posicionada para proteger a área de regeneração.



Fig. 2

A membrana preserva o coágulo, essencial para o processo de regeneração.



Fig. 3

### Passo 3: Formação Óssea

Novo tecido ósseo se forma progressivamente na área protegida.



Fig. 4

Após 90 dias, a arquitetura do rebordo está completamente recuperada, com uma quantidade considerável de tecido queratinizado, estando pronta para receber um implante osteointegrável.



Fig. 5

### Resultado Final

Após o período de osteointegração, obtém-se um excelente resultado de regeneração, permitindo a reabilitação protética do paciente.



Fig. 6



# Bone Heal®

Simplifica a técnica de  
Regeneração Óssea Guiada  
com **segurança e previsibilidade**



Acesse nosso site  
[www.boneheal.com.br](http://www.boneheal.com.br)



CONTATOS  
Administrativo: (11) 99440-2278  
Vendas: (11) 94512-2884  
Email: [contato@boneheal.com.br](mailto:contato@boneheal.com.br)

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DAS BARREIRAS BONE HEAL® E HEAL BONE®

- 100% sintética, sem porosidades, resistente e bioinerte.
- Não absorvível, indicada para ficar intencionalmente exposta.
- Dispensa o uso de outros biomateriais e antibioticoterapia.
- Técnica de aplicação simples, acessível a clínicos gerais, sem necessidade de instrumentos especiais, nem cirurgia para removê-la.
- Não interfere na posição da linha mucogengival.
- Pronta para ser utilizada, não precisa ser hidratada.
- Possibilita inserir implante, unitário ou múltiplos imediatos ou em 90 dias.
- Promove ato cirúrgico de alto valor agregado e baixo custo.

## DIFERENCIAIS DAS BARREIRAS BONE HEAL® E HEAL BONE®

- Tecnologia exclusiva patenteada.
- Única barreira de polipropileno cientificamente comprovada com mais de 10 anos de controle de caso clínicos.
- Mais de 200 mil barreiras vendidas.
- Fabricante e produtos com a mesma qualidade e segurança há mais de 10 anos.
- Empresa reconhecida nacionalmente como a única no mercado odontológico por somente fabricar barreiras de polipropileno.



## BONE HEAL®

Barreira de polipropileno não absorvível, **capaz de permanecer instalada por mais de 30 dias**, sendo assim, incomparavelmente versátil e ideal para uso em casos simples ou complexos.

Regenera simultaneamente o tecido ósseo e queratinizado, com alta previsibilidade, **dispensando uso de enxertos e outros biomateriais de preenchimento**. Sua memória a mantém estável em posição sobre o defeito, sem que haja alterações dimensionais.



## HEAL BONE®

Esta barreira de polipropileno é produzida através de processo fabril, que confere alta memória inicial. É mais acessível e entrega os mesmos resultados, simplicidade de manuseio e características principais do modelo Bone Heal®, **sendo capaz de permanecer instalada por até 28 dias**.

Indicada para ser utilizada em casos mais convencionais, como nas exodontias, associadas ou não com instalação de implantes imediatos.

