

Abra aqui

Contém 1 unidade

Foyomed®

ADULTO

MICRONEBULIZADOR

Nebulizer Mask - Compressed Air

Ar comprimido

Conector amarelo

3/4" - 16UNF



CONTÉM:

Máscara com elástico - PVC; Copo nebulizador - Polipropileno + Poliestireno; Extensão oxigênio - PVC e Conector - PVC

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Gire o recipiente de aerossol, retire a tampa superior, adicione o medicamento líquido de acordo com a prescrição médica, coloque a tampa superior na parte de trás e gire firmemente para a direita.
2. Conecte o Micronebulizador a saída de ar comprimido.
3. Coloque a máscara no rosto do paciente com a cinta elástica abaixo das orelhas e ao redor do pescoço, puxe suavemente as extremidades da alça até que a máscara esteja segura. Forme a tira de metal na máscara para ajustar o nariz.
4. Abra o fornecimento de gás, ajuste o fluxo conforme prescrição.

Procedimento de limpeza/ desinfecção:

Proceda a limpeza preliminar do micronebulizador. Coloque o nebulizador em álcool 70% por 30min para desinfetar. Retire do álcool médico e enxague com água limpa. Proceda a secagem do micronebulizador.

O Reuso poderá resultar em infecção cruzada.

CUIDADOS:

- O fabricante recomenda o uso único, descartar após o uso.
- Não armazenar em temperaturas e umidade extremas.
- Certifique-se de que todas as conexões estão seguras e que o ar circula livremente pelo tubo.
- Contém látex natural, pode causar alergia.



ESTÉRIL OE

Estérilizado a Oxido de Etileno

CE 0197

PRODUTO ESTÉRIL



REF: LB201104CY

LOT: FY2005092

Fabric.: 25/06/2020

Valid.: 24/06/2025

FABRICADO POR:

Ningbo MFLAB Medical Instruments Co., Ltd.
No. 76 Liangang Road, Yinzhou Economic
Development Zone, Zone, Ningbo, China.

EC-REPRESENTATIVE:

Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe) Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg,
Germany Made in China

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CIRURGICA FERNANDES
Al. Africa, 570 - Santana de Parnaíba - São Paulo
CNPJ 61.418.042/0001-31 Sac 0800.7701647
www.cfbernandes.com.br
Resp. Técnico: Enf. Lúcia A. Higa - Coren SP 69259
Reg MS: 10150470540

FABRICADO NA CHINA